

盒子裏包含：

一個Sleep8設備

Sleep8 使用臭氧為您的 CPAP 用品和配件提供消毒服務。



過濾袋

這就是神奇之處。將您的 Sleep8 設備連接到過濾袋，即可輕鬆消毒所有 CPAP 組件。



充電器

使用 USB 充電器為 Sleep8 設備充電。



90天

我們建議在每天使用的情況下，每 3 個月更換一次過濾袋，以保持過濾器的良好工作狀態。

使用指引、注意事項和產品規格

使用說明：您必須對自己的行為負責，因此在使用前務必熟悉產品附有的說明和安全信息。Sleep8 設計用於支持正壓通氣 (PAP) 機的設備和配件。使用正壓通氣 (PAP) 機治療阻塞性睡眠呼吸暫停 (OSA) 的患者可以每天使用 Sleep8 消毒所有正壓通氣設備和配件。

在使用之前，請務必將 PAP 面罩擦拭乾淨，以去除任何可見的污垢或油漬。Sleep8 可以用微溼的布擦拭清潔。過濾袋無需清潔，只有在翻污時才需要更換。管道必須從 PAP 機器上拆開，然後連接到 Sleep8 過濾袋的內部端口。所有設備和配件都應放入袋內後拉上拉鍊。操作前請檢查連接是否牢固或是否有任何潛在的洩漏。如果發現任何可能洩漏的地方，請不要開始操作，而是聯繫 CPAP Sleep8.com

- ▲ 危險：不要在小於 9x9 英寸的密封房間內操作。
- ▲ 危險：遠離水源，包括雨水、浴缸、水槽和水池。
- ▲ 危險：如果袋子沒有拉上拉鍊，請勿啟動 Sleep8。
- ▲ 危險：遠離明火或火源。危險：遠離兒童。它不是玩具。
- ▲ 危險：請勿在空氣易爆的環境、氣體蒸汽或其他易燃物附近使用。
- ▲ 危險：不要在 Sleep8 或過濾袋上放置任何物品，尤其是易燃或可燃物品。
- ▲ 危險：切勿在 Sleep8 過濾袋內放置任何生物。
- ▲ 警告：請勿拆卸 Sleep8 設備。
- ▲ 警告：請勿連續運行 Sleep8 設備超過 2 小時。
- ▲ 警告：Sleep8 設備內有敏感電子元件。如果您的 Sleep8 設備或過濾袋變了，請用乾布擦拭乾淨。請勿將 Sleep8 或過濾袋浸入水中，也不要使用任何化學清潔劑進行清潔。
- ▲ 警告：請勿在使用 PAP 機時使用 Sleep8。Sleep8 不是 PAP 機器。
- ▲ 警告：在使用 Sleep8 時，請勿打開過濾袋。
- ▲ 警告：如果在操作過程中檢測到洩漏，請離開房間並關閉房門。等待 2 小時後再進入房間。
- ▲ 警告：請勿將 Sleep8 放置或操作在足以引發火災或導致設備熔化的高溫表面上。
- ▲ 停止使用的原因：Sleep8 不能用於清潔接觸過乳液、面霜、油或香料的面罩。如果面罩接觸部位出現粉刺或皮疹，請停止使用 CPAP。如果設備損壞或出現故障，請聯繫製造商。最終用戶無法進行維護或修理。

電氣特性

充電器輸入：AC 100-240V-50/60Hz 0.2A
設備輸入：DC5V/1A 功率 <4W
設備電壓：3.7V/2600mAh
功率消耗：最大 5W
電池：I 型鋰離子電池，2600 mAh。UL 認證，通過 UN 38.3
注：USB 端口的額定電壓不超過 5 伏。請僅使用 Sleep8 官方提供的充電線和電源。隨附電源具有過壓保護功能，包括多重內部保護。Sleep8 官方提供的充電線和電源。隨附電源具有過壓保護功能，包括多重內部保護。

環境特性：

本設備設計用於室內，海拔不超過 3,000 米，溫度在 5°C-40°C 之間。
適用於相對濕度等於或低於 80% 的環境，溫度不超過 31°C。相對濕度在 40°C 時線性下降至 50%。
工作溫度 50°F 至 100°F，溼度為 15% 至 70%。
儲存：32°F 至 131°F，溼度為 15% 至 70%。

Sleep8 已通過測試，符合 FCC 規則第 18 部分規定的 B 類數字設備限制。FCC 47 CFR Part 18:2019。ICES-001，2006 年 6 月第 4 期。附帶的適配器已通過 ETL 和 RoHS 認證。

sleep8™

快速入門指南

用於消毒所有 PAP 設備和配件。CPAP, APAP, Bi-PAP




三個簡單的步驟

1

擦拭 CPAP 配件，放進袋子裏，拉上拉鍊。


確保面罩在開始消毒前已擦拭乾淨，已去除任何可見的污垢或油脂。拉開袋子的拉鍊，找到裏面的白色圓形閘門。從 CPAP 機器上拆下管道，將其連接到此閘門上。將 CPAP 管道、面罩、墊子和幹水室*放入袋中。然後拉上拉鍊。

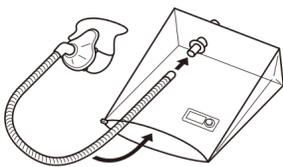

2

在過濾袋連接 Sleep8。

將 Sleep8 的三角形接口插入過濾袋外的三角形閘門上。確保設備上的藍點與過濾袋的端口相吻合。它們應緊密貼合。只有安全連接後，設備才能工作。再次確保將袋子的拉鍊完全拉上。

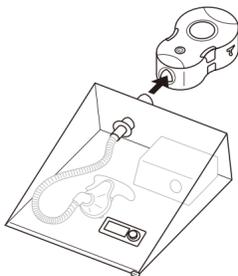

3

長按直到機器啟動，然後鬆開

按住電源按鈕，直到聽到“嗶”的一聲並看到 Sleep8 屏幕亮起。(始終將過濾袋朝上放置，Sleep8 設備屏幕朝上)。屏幕會倒計時，直到過程完成。聽到風扇擺動和短暫停頓是正常的。運行 60 分鐘後，Sleep8 風扇會再暫停 60 分鐘，然後再次開啓，最後運行 15 分鐘。完成後，Sleep8 將自動關閉*。整個過程結束後，應將過濾袋保持關閉 1 小時。之後，拉開過濾袋的拉鍊，即可使用 CPAP 配件。



為 Sleep8 設備充電。

當您發現電池電量不足時，請使用隨附的 Sleep8 充電器為其充電。不能給 Sleep8 過度充電。

使用 Sleep8 充電器插入設備後，設備會發出一聲蜂鳴聲，屏幕會變暗，電池圖標會顯示充電進度。一旦圖標顯示滿 4 格，Sleep8 即已充滿電，可以開始工作。此外，插入或拔出設備時，控制方式都將保持不變。注意：Sleep8 在充電時可以支持您的用品和配件。詳情請參見背面的“使用說明、注意事項和規格”。

訪問 CPAP Sleep8.com 獲取视频教程和其他資源

*如果不確定進程是否正確結束或設備是否關閉：

- 1) 確保 Sleep8 已關閉。
- 2) 記下當前時間。
- 3) 從當前時間開始等待兩小時，直到打開袋子。
- 4) 如果您仍然不確定 Sleep8 是否能夠完全完成循環，可以重新打開 Sleep8 並重新開始運行。

* 對於使用帶水箱的 CPAP 的患者：在將水箱放入袋中之前，請務必將其徹底晾乾。

在極少數情況下，某些專有管道需要特殊說明。請訪問 CPAP Sleep8.com 下的常見問題部分了解更多信息。

屏幕

電池

電池圖標顯示設備的電量。根據使用環境，電池每次充電可持續使用 2-3 次。當該圖標電量不足時，請務必為 Sleep8 充電。

計時器

兩位數倒計時器會顯示剩餘時間。完成後，設備將發出 5 次蜂鳴聲，然後“OK”將取代數字顯示出來。

風扇

設備工作時，風扇圖標將跳動。

O₃

圖標將顯示，表示過濾袋已正確連接，設備正在工作。

警告和警報

E2 風扇故障

“E2”將出現跳動，設備將發出蜂鳴聲。請聯繫 CPAP Sleep8.com 的客戶支持中心尋求幫助。

X 設備連接不正確

“O₃”將會顯示“X”，設備會發出 30 秒蜂鳴聲。檢查電源按鈕的警報。

E1 電池電量不足

“E1”會跳動，設備會發出蜂鳴聲。為 Sleep8 充電。注意：設備在充電時仍可正常工作。

▲ 注意

應謹慎使用並查閱使用說明書，對顯示此符號。